

NAVODILO ZA UPORABO



Kapljice za oči pri alergijah



Pri rdečih, pekočih in srbečih očeh

Primerne za
uporabnike kontaktnih leč

Kapljice za oči pri alergijah

Zagotavljajo hitro in dolgotrajno lajšanje rdečih, pekočih in srbečih oči zaradi sezonskih alergijskih reakcij (seneni nahod). Nudijo zaščito pred cvetnim prahom, ki lahko sproži odziv telesa na alergijske reakcije.

- Vsebnik vsebuje 10 ml sterilne raztopine.
- Raztopina ne vsebuje konzervansov.
- Po prvem odprtju vsebnika so kapljice uporabne še 6 mesecev.

S hialuronsko kislino

A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah vsebujejo hialuronsko kislino, ki pomaga pomiriti rdeče, pekoče in srbeče oči.

Hialuronska kislina v A.Vogel Kapljicah za oči pri alergijah je rastlinskega izvora. Ne vsebuje gensko spremenjene soje in ni živalskega izvora.

Edinstven vsebnik za odmerjanje

A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah so napolnjene v vsebnik s praktičnim sistemom odmerjanja. Ta omogoča, da se naenkrat sprosti le ena kapljica. Odmerjanje je zato enostavno. Edinstven vsebnik ohranja sterilnost vsebine brez dodanih konzervansov. Zato jih tudi pri pogosti uporabi dobro prenašamo.

Po prvem odprtju vsebnika so kapljice uporabne še 6 mesecev.

Uporaba kontaktnih leč

Če nosite kontaktne leče, jih pred uporabo teh kapljic za oko ni potrebno odstraniti.

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli: v vsako oko kanite po eno kapljico, po potrebi, do 5-krat na dan.

A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah lahko uporabljate neprekinjeno, vsakodnevno, do 30 dni. Če po 30 dneh neprekinjene, vsakodnevne uporabe ni izboljšanja, se posvetujte z oftalmologom. A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah lahko uporabljate v intervalih skozi daljše obdobje.

Če se simptomi po 3 dneh uporabe ne izboljšajo, ali če se stanje poslabša oz. pride do vnetja oči, se takoj posvetujte z zdravnikom.

Otroci, starejši od 7 let: v vsako oko kanite po eno kapljico 1- do 2-krat dnevno, po posvetu z zdravnikom.


A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah se lahko uporabljajo pri otrocih od 7. leta dalje, če je bilo ugotovljeno s strani zdravnika, da težave z očmi ne zahtevajo dodatne zdravniške oskrbe.

Trajanje uporabe pri otrocih mora določiti zdravnik, vendar naj brez prekinitve ne presega 30 dni. A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah mora aplicirati odrasla oseba. Otrokom je lahko uporaba kapljic za oči neprijetna. Bodite zato pozorni na nepričakovane premike otroka med aplikacijo kapljic, da se prepreči stik konice vsebnika z očmi.


Ob sočasni uporabi drugih kapljic za oči mora med uporabo preteči vsaj 30 min, A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah pa je potrebno aplicirati zadnje. Očesna mazila je potrebno nanesti vsaj 30 minut po nanosu A.Vogel Kapljic za oči pri alergijah.

Vsebnik vsebuje 10 ml sterilne raztopine (približno 300 kapljic). Majhna količina raztopine ostane v vsebniku tudi potem, ko iz kapalke ne priteče več nobena kapljica. Priporočamo, da en vsebnik uporablja vedno ista oseba.

Način uporabe

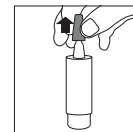

1. Z vsebnika odstranite obarvan pokrovček.

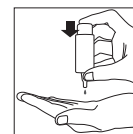

2. Pred prvo uporabo vsebnik obrnite s kapalko navzdol in toliko časa pritiskajte na dno, da skozi kapalko priteče prva kapljica. S tem je vsebnik pripravljen za uporabo.



3. Glavo nagnite rahlo nazaj in potisnite spodnjo veko navzdol. Vsebnik držite nad očesom s palcem in sredincem ter s kazalcem pritisnite na dno vsebnika. Kapljice aplicirajte v notrajni kot očesa.



4. Oko zaprite, s čimer se bo tekočina enakomerno porazdelila po celotni površini očesa.

Kaj morate vedeti, preden boste uporabili A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah?

Ne prekoračite priporočenega odmerka.

Uporaba med nosečnostjo in dojenjem

Na voljo ni informacij o uporabi kapljic med nosečnostjo in dojenjem. Priporočamo, da se pred uporabo A.Vogel Kapljic za oči pri alergijah posvetujete s svojim zdravnikom.

Ne uporabljajte A.Vogel Kapljic za oči pri alergijah

A.Vogel Kapljic za oči pri alergijah ne smete uporabljati, če ste preobčutljivi na katero koli vsebovano sestavino.

Možni neželeni učinki

V posameznih primerih se lahko med apliciranjem pojavijo preobčutljivostne reakcije (pekoč občutek in bolečina).

Prenašanje A.Vogel Kapljic za oči

Edinstven vsebnik ohranja sterilnost vsebine brez dodanih konzervansov. Zato jih tudi pri pogosti uporabi dobro prenašamo.

Sestavine

Hialuronska kislina 1 mg/ml, kamilica (*Chamomilla recutita*), natrijev klorid, borova kislina, dinatrijev tetraborat dekahidrat, sterilizirana voda.

Lahko vsebujejo sledi soje.

Brez konzervansov. Primerno za vegane.

Shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi od 8 do 25 °C. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Po prvem odprtju vsebnika so kapljice uporabne še 6 mesecev.

Kapljic ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in vsebniku.

Želite več informacij?

Za vse dodatne informacije in nasvete obiščite www.avogel.si ali www.farmedica.si, pokličite na 01/5240216 ali pošljite e-pošto na navseti@farmedica.si.

Nasveti

- Zagotovite primerno notranjo vlažnost prostorov (med 40 in 60 odstotki).
- Zaprite vrata in okna v vročih in vetrovnih dneh, da preprečite vstop delcem cvetnega prahu v vaš dom.
- Prostore zračite zgodaj zjutraj, ko je zunaj še vlažno.
- Razmislite o nošenju sončnih očal, da zaščitite oči pred cvetnim prahom.
- Na sprehod se raje odpravite po dežju ali zgodaj zjutraj, ko je vsebnost cvetnega prahu v zraku manjša.

Skrb za okolje

Prizadevamo si za čim manjše obremenjevanje okolja, zato uporabljamo kar največ okolju prijazne embalaže.

Ti materiali pri sežiganju niso škodljivi za okolje in so primerni za recikliranje.

Distributer

Farmedica d.o.o.

Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

Proizvajalec

HÄLSA Pharma GmbH

Maria-Goeppert-Straße 5, D-23562 Lübeck, Nemčija

Paleta izdelkov

A.Vogel Kapljice za oči so na voljo:

A.Vogel Kapljice za oči Extra Intense*	Pri zelo suhih, pekočih in utrujenih očeh	10 ml
A.Vogel Kapljice za oči*	Pri suhih, pekočih in utrujenih očeh	10 ml
A.Vogel Kapljice za oči pri alergijah*	Pri rdečih, pekočih in srbečih očeh	10 ml

* medicinski pripomoček, pred uporabo preberite priloženo navodilo

To navodilo je bilo nazadnje posodobljeno julija 2020.



8°C - 25°C STERILE/A

Razlaga simbolov

Proizvajalec

Uporabno do

Številka serije

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

Shranjujte pri temperaturi med 8 in 25 °C.

Sterilni pripomoček

Preberite navodila za uporabo glede pomembnih svarilnih informacij, kot so opozorila in previdnostni ukrepi.

Oznaka CE s številko priglašene organa

