


OTOSAN[®]

NASAL WASH

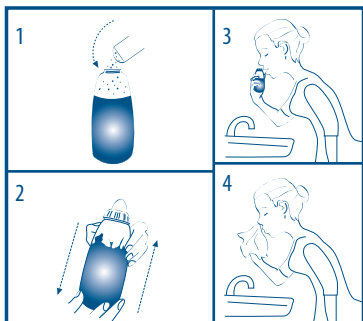

SLO

**FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA IZPIRANJE
NOSNE VOTLINE**

NAVODILA ZA UPORABO

- Stekleničko napolnite s toplo pitno vodo temperature 35–40 °C do oznake na steklenički.
- Raztopite eno ali dve vrečki (izotonične ali hipertonične raztopine). Glejte sliko 1.
- Dobro pretresite stekleničko, da se fiziološka raztopina v vodi popolnoma raztopi. Glejte sliko 2.
- Glavo in telo nagnite rahlo naprej, nad umivalnik, stekleničko pa držite pokonci.
- Konec stekleničke vstavite v eno nosnico in pri tem dihalte skozi usta. Glejte sliko 3.

- Nežno pritisnite na dno stekleničke. Raztopina naj steče notri skozi eno nosnico, ven pa skozi drugo. Med izpiranjem dihajte skozi usta. Po izpiranju obdržite glavo še nekaj časa nagnjeno naprej.
- Enak postopek ponovite z drugo nosnico.
- Nežno upihnite nos. Glejte sliko 4.

OPOZORILA

V primeru popolnoma zamašenega nosu, vnetja ušesa ali nedavnega posega na dotičnem področju, se pred uporabo raztopine za izpiranje nosu Otosan posvetujte z zdravnikom. V primeru neugodja ali bolečine v nosu ali ušesu med uporabo, z izpiranjem prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.

Za pripravo raztopine ne uporabljajte vrele vode. Fiziološko raztopino in stekleničko shranjujte nedosegljivo otrokom. Hranite pri sobni temperaturi v suhem prostoru. Nosno votlino izpirajte samo z mešanico vode in fiziološke raztopine za izpiranje nosu Otosan.

Izdelka ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katero koli izmed sestavin. Izdelek uporabljajte samo v skladu s temi navodili za uporabo in samo v namene, ki jih je opredelil proizvajalec. Brez predhodnega posveta z zdravnikom izdelka ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 let.

 **OTOSAN S.r.l.**

Via degli Scavi, 32 - 47122 Forlì - Italy
www.otosan.com

1263 | REV.1 05/09/2019

