

# ACNOZOIL®

CREAM

## ERBAGIL

**Obnavlja in regenerira kožo**  
z



**OZOILE®**  
ERBAGIL PATENT

Stabilni ozonidi

### INDIKACIJE

Acnozoil krema je namenjena preprečevanju in oskrbi aknavosti in dermatoloških težav za katere je značilno vnetje, draženje, eritem, kseroza, srbenje, luščenje, možne okužbe, spremembe flore in kožne pregrade, kot so dermatitisi, dermatoze in luskavica. Acnozoil® krema je prav tako namenjena preprečevanju in oskrbi akutnih in kroničnih kožnih poškodb različnih vzrokov.

### GLAVNE SESTAVINE

OZOILE® (stabilni ozonidi z Vitamin E acetatom), ekstrakt korenine Ruscus Aculeatus (bodeča lobodika), cvetni ekstrakt Calendula officinalis (vrtni ognjič), ekstrakt listov Ribes Nigrum (črni ribez), ekstrakt Equisetum Arvense (njevaska preslica), natrijev hialuronat, tioktična kislina.

OZOILE®, stabilni ozonidi z vitaminom E acetatom, je skupina inovativnih molekul, pridobljenih s patentiranim postopkom, ki deluje proti vnetju, srbečici, preprečuje hipoksijo, ustvarja neugodno okolje za širjenje patogenih mikrobov in spodbuja obnovo tkiva.

### NAVODILA ZA UPORABO

Kremo namažite neposredno na prizadeto območje. Pri oskrbi dermatoloških težav nanesite Acnozoil kremo 2 do 3 krat na dan. Pri oskrbi akutnih in kroničnih kožnih obolenj zaradi različnega vzroka lahko kremo nanesete tudi neposredno na celotno poškodovano območje, še posebej med fazo granulacije. Na kožo okoli poškodovanega področja pa nanesite enakomerno plast kreme za več kot 5 cm okoli prizadetega območja. Obdobje uporabe je različno in je odvisno od zahtevnosti poškodbe in hitrosti terapevtskega odziva.

### OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Samo za lokalno uporabo. Ne zaužijte. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana. Ne uporabljajte medicinskega pripomočka po datumu uporabnosti. Datum uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno shranjevan izdelek. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Shranjujte po možnosti med 5 °C in 35 °C. Pred uporabo medicinskega pripomočka si dobro umijte roke. Po uporabi tubo dobro zaprite. Po odprtju je priporočljivo uporabiti izdelek v 6 mesecih.

### KONTRAINDIKACIJE

Acnozoil® kremo večina zelo dobro prenaša.

Kontraindicirana je pri preobčutljivosti na posamezne sestavine.

Ni primerov preobčutljivosti ali stranskih učinkov, če pa se slučajno pojavijo, prosimo, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Ni znanih primerov prevelikega odmerjanja.

Ni znanih interakcij z zdravili in drugimi medicinskimi snovmi.

### PAKIRANJE


40 ml tuba

MIKROBIOLOŠKI TEST  
KOŽNI ALERGIJSKI TEST  
CITOTOKSIČNI TEST  
BREZ GLUTENA  
BREZ BARVIL  
BREZ ALERGENOV

### Uvoznik in distributer:

MagPharm d.o.o., Dunajska cesta  
181,1000 Ljubljana  
040 457 767, 040 558 657 magpharm.si,  
info@magpharm.si

MEDICINSKI PRIPOMOČEK II B  0425

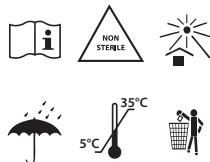

 ERBAGIL srl  
Via L.Settembrini, 13 Telesse Terme BN Italy  
[www.erbagil.com](http://www.erbagil.com)