


PREPROSTO 1-2-3

Sledite le trem korakom.**

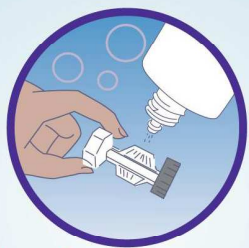

1. Spiranje

Leče položite v košarico in jih sperite z AOSEPT® PLUS.



2. Polnjenje

Posodico napolnite do oznake.



3. Namakanje

Leče namakajte v posodici šest ur oziroma čez noč.

**NE ODSTRANITE PRED
IZTEKOM 6 UR!**

POMEMBNO

Prehod iz večnamenske tekočine za čiščenje leč na AOSEPT® PLUS je preprost. Zapomnite si le naslednja pravila:



Nikoli ne uporabite posodice za večnamensko tekočino.

AOSEPT® PLUS ima priloženo posebej oblikovano posodico.



Tekočina potrebuje 6 ur, da se nevtralizira, zato leč nikoli ne odstranite iz posodice pred pretekom tega časa.



Leč pred vstavitvijo v oko nikoli ne sperite z neneutralizirano tekočino AOSEPT® PLUS. Za spiranje uporabite sterilno fiziološko tekočino.



Neneutralizirane tekočine AOSEPT® PLUS nikoli ne iztisnite neposredno v oko.

VZDRŽUJTE VAŠE KONTAKTNE
LEČE ČISTE IN UDOBNE Z
AOSEPT® PLUS.



CIBAVISION
Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

*Če se uporablja, kot je bilo naročeno. ** Navodila očesnih strokovnjakov se lahko razlikujejo. Natančna navodila se nahajajo v embalaži. Logotipi AOSEPT, CIBA VISION in CIBA VISION so blagovne znamke Novartis AG. © 2011 CIBA VISION Corporation, a Novartis AG company



BOLJ UDOBNE

kontaktne leče



NEGA LEČ JE KLJUČ

do vedno svežih, čistih in udobnih kontaktnih leč.

Z uporabo AOSEPT® PLUS - **tekočine za temeljito čiščenje in dezinfekcijo kontaktnih leč** boste izkusili izredno udobje pri nošnji.

Uporabniki mehkih kontaktnih leč boste po uporabi učinkovitega sistema AOSEPT® PLUS izkusili izredno **naraven občutek nošnje** - kot da leč sploh ne bi nosili.

Če ste imeli doslej zaradi uporabe tekočine za čiščenje kontaktnih leč suhe, razdražene oči ali ste občutljivi na dodane sestavine, preizkusite AOSEPT® PLUS.



TROJNI UČINEK ČIŠČENJA

AOSEPT® PLUS vsebuje raztopino **3% VODIKOVEGA PEROKSIDA**, ki omogoča močni **TROJNI UČINEK ČIŠČENJA** in posledično izredno udobno izkušnjo pri nošnji leč.



GLOBINSKO ČIŠČENJE



ZMANJŠANJE OBLOG



OKREPLJENO
ODSTRANJEVANJE
PROTEINOV

Poleg izrednih rezultatov čiščenja in dezinfekcije boste deležni **BREZPLAČNE** posodice, ki je zasnovana posebej za uporabo AOSEPT® PLUS.



Tako močan, da boste opazili razliko.

Med izhajanjem mehurčkov lahko opazujete, kako AOSEPT® PLUS deluje!

Očem tako prijazen,* da boste opazili razliko.

Edinstvena posodica po šestih urah nevtralizira tekočino AOSEPT® PLUS. Nastane nežna fiziološka tekočina, podobna naravnim solzam. Spiranje leč pred ponovno vstavitvijo v oko zato ni potrebno.

Vaše kontaktne leče + AOSEPT® PLUS = izjemno udobje.

