

Pred vsako uporabo izdelka Multi-Gyn LiquiGel natančno preberite celotna navodila in jih shranite.

Multi-Gyn LiquiGel – odpravlja in lajša simptome suhosti nožnice

- Neposredno lajša težave zaradi suhosti nožnice in spodbuja naravno vlaženje.
- Preprečuje draženje in poskrbi za optimalno stanje vaginalnega tkiva.
- Dopolnjuje in podpira naravno vlaženje nožnice.
- Je naraven, varen in ščiti floro v nožnici.

Delovanje izdelka Multi-Gyn LiquiGel

Izdelek Multi-Gyn LiquiGel neposredno olajša suhost nožnice. Poskrbi za optimalno stanje vaginalnega tkiva in spodbudi naravno izločanje nožnične tekočine. Osnovna sestavina izdelka Multi-Gyn LiquiGel je patentiran 2QR-kompleks. To je naravna sestavina, pridobljena iz zdravih rastlin, ki vsebuje bioaktivne polisaharide. Posebnost te sestavine je, da učinkovito in varno nevtralizira škodljive mikroorganizme. Zato je primerna tudi za naravno obnavljanje poškodovanega tkiva intimnega področja. Izdelek Multi-Gyn LiquiGel spodbuja vlaženje nožnice ter omili in preprečuje suhost in draženje v nožnici. Sodeluje pri naravnem postopku vlaženja in pomaga doseči naravno ravnovesje, ne da bi prizadel vaginalno floro. Ko se nožnično tkivo ponovno navlaži, se povrne tudi njegova naravna prožnost in pravilno delovanje. Izdelek Multi-Gyn LiquiGel prekrije sluznico z bioadhezivnim filmom, ki zagotavlja dolgotrajno vlažnost nožnice in ohranja zdravo vaginalno okolje. Med spolnim odnosom dopolnjuje in podpira naravno izločanje nožnične tekočine. Redna uporaba izdelka Multi-Gyn LiquiGel zmanjša občutek draženja in ohranja optimalno stanje nožnice. Sestava gela je naravna, varna in nežna, saj izdelek ne vsebuje škodljivih snovi ali dražičih kemikalij, zato nima negativnih stranskih učinkov.

Izdelek Multi-Gyn LiquiGel ni hormonsko zdravilo. Zaradi edinstvenega delovanja je izdelek registriran kot medicinski pripomoček razreda IIa.

Indikacije

- suhost nožnice med menopavzo in po njej
- suhost nožnice, ki nastane zaradi hormonskih sprememb, uživanja zdravil in stresa
- suhost nožnice med spolnim odnosom
- atrofija nožnice, draženje in/ali neugodje

Navodila za uporabo

• **V primeru suhosti nožnice** uporabite izdatno količino izdelka Multi-Gyn LiquiGel najmanj enkrat dnevno ali kadar koli želite olajšati takšne simptome.

• **Za preprečevanje suhosti nožnice in draženja, povezanega s suhostjo nožnice, uporabljajte izdatno količino izdelka Multi-Gyn LiquiGel dvakrat dnevno najmanj pet dni zapored.**

• **Za spodbujanje naravnega vlaženja nožnice** uporabite izdelek Multi-Gyn LiquiGel enkrat dnevno tik pred spanjem.

Gel ne pušča madežev na spodnjem perilu. Je varen, nežen in neposredno olajša suhost, draženje in srbenje nožnice.

Opozorilo!

Multi-Gyn LiquiGel je izdelek z aktivnim delovanjem v intimnem predelu, ki ob enem vlaži, obnavlja in spodbuja naravno vlaženje tkiva. Zaradi aktivnega delovanja se lahko ob vnosu ali nanosu izdelka Multi-Gyn LiquiGel pojavita topel občutek in ščemenje. Oboje je povsem običajno in bo po nekaj minutah izginilo. Izdelka Multi-Gyn LiquiGel ne uporabljajte več kot 30 dni zapored, da omogočite vzpostavitev naravne vaginalne flore brez dodatne pomoči. Ob stalnih in ponavljajočih se težavah se vselej posvetujte s svojim zdravnikom.

Sestavine izdelka Multi-Gyn LiquiGel

Multi-Gyn LiquiGel vsebuje več kot 25 % 2QR-kompleksa. Druge sestavine so rastlinski glicerol, naravni zgoščevalec ksantanski gumi in naravni regulator celičnih tekočin (osmoregulator) betain.

Izdelek Multi-Gyn LiquiGel ne vsebuje konzervansov, hormonov, silikonov, sestavin živalskega izvora, dražičih kemičnih snovi ali dišav in je povsem neškodljiv. Ni masten, ne pušča madežev in je topen v vodi. Ne poškoduje tamponov in kondomov.

Aktivne sestavine:

Galactoarabinan Polyglucuronid Acid Crosspolymer*, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum

*2QR-kompleks: patentirani bioaktivni polisaharidi. www.2QR.com

Alergijske reakcije na sestavine v izdelku Multi-Gyn LiquiGel so zelo redke. Priporočamo, da pred prvo uporabo nanesete nekaj gela na notranjo stran podlakti. Če se pojavi srbeča rdečica, svetujemo, da izdelka Multi-Gyn LiquiGel ne uporabljate.

Stranski učinki

Izdelek Multi-Gyn LiquiGel nima znanih stranskih učinkov in je naraven in varen izdelek. Izdelek Multi-Gyn LiquiGel nima kontracepcijskih učinkov, saj ne vsebuje spermicidov. Vpliv gela na aktivnost spermijev ni raziskan.

Nezdružljivost z zdravili

Izdelek Multi-Gyn LiquiGel ne vpliva na učinkovanje zdravil.

Nosečnost in dojenje

Za uporabo izdelka Multi-Gyn LiquiGel med nosečnostjo in dojenjem ni znanih kontraindikacij.


Shranjevanje

Priporočamo shranjevanje izdelka Multi-Gyn LiquiGel pri temperaturi med 10 °C in 25 °C (sobna temperatura).


Uporaba

Zunanja uporaba:


V primeru suhosti na **zunanjem delu spolovila** (vulva) lahko izdelek Multi-Gyn LiquiGel nanesete s prstom (pred nanosom in po njem si vedno umijte roke).

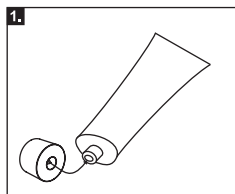


1. S tube odvijte pokrovček. Pred prvo uporabo s hrbtno stranjo pokrovčka preklunjajte zaprto tubo.

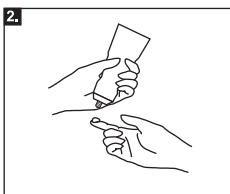

2. Z eno roko primate tubo in podprite kazalec druge roke tako, kot prikazuje slika. Nežno stisnite. Stiskajte, vse dokler ne boste na kazalcu imeli zadostne količine gela, kot prikazuje slika.

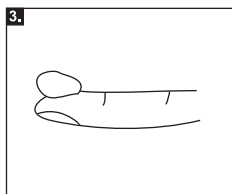

3. Gela na kazalcu naj bo vsaj za konico prsta (2 ml).

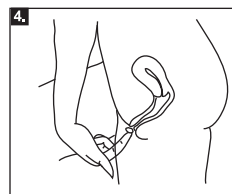


4. Gel nanesite na zunanji del spolovila.

Ekzkluzivni zastopnik za Slovenijo:
Gordo d.o.o.
Bezenskova ulica 72, 2000 Maribor


Proizvajala:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nizozemska

• notranjo uporabo


Lahko uporabite poseben aplikator. Ta je priložen v škatlici in ga je mogoče priviti na tubo. Po uporabi vam aplikatorja ni treba odstranjevati s tube, le umijte ga pod curkom tople vode in nanj namestite pokrovček. Če gel raje vnašate s prstom, si najprej umijte roke in na kazalec nanesite vsaj 2 ml gela (za konico prsta). Nato gel s prstom vnesite v nožnico.

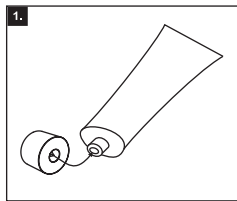


1. S tube odvijte pokrovček. Pred prvo uporabo s hrbtno stranjo pokrovčka preluknjajte zaprto tubo.

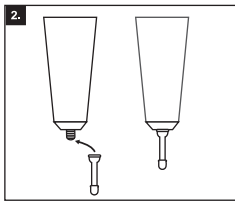


2. Aplikator, ki je priložen v škatlici, privijte na tubo.

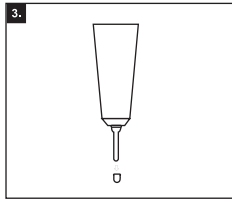


3. Z aplikatorja snemite pokrovček.

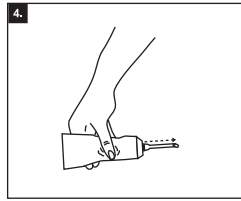


4. Tubo vzemite v eno roko in jo rahlo stisnite, da gel priteče skozi tulec aplikatorja. Ko gel priteče ven, je to znak, da je aplikator napolnjen z gelom in tako pripravljen za uporabo. Z rahlim pritiskom preizkusite, kolikšna količina bo pritekla ven. Potrebovali boste vsaj 2 ml gela (za konico prsta).

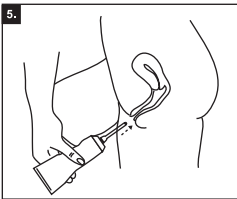


5. Aplikator, ki je privit na tubo, potisnite v nožnico tako, kot prikazuje slika. Nožnica je dolga 7-8 cm in je sorazmerna z dolžino kazalca pri povprečni ženski. Dolžina aplikatorja je približno enaka dolžini kazalca, zato aplikator ne bo poškodoval materničnega vratu.

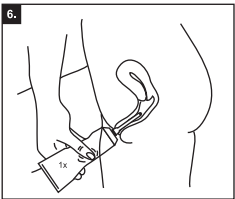

6. Tubo nežno stisnite. Potrebujete vsaj 2 ml gela (za konico prsta). Vsekakor pa ni omejitev ali tveganj, če uporabite več gela.

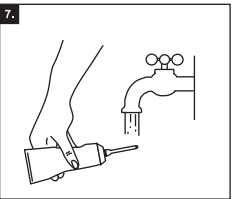

7. Aplikator lahko po uporabi pustite na tubi. Operite ga pod curkom tople vode.

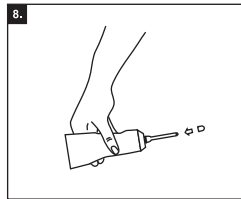

8. Na aplikator namestite pokrovček.

Osnovne informacije

Suhost in občutek nelagodja v nožnici sta pogost pojav

S suhostjo nožnice in občutkom nelagodja v intimnem predelu se v različnih življenjskih obdobjih sooča več kot polovica žensk. Zaradi hormonskih sprememb se suhost in občutek nelagodja naravno pojavljata pri ženskah v menopavzi in po njej. Običajno je vaginalna stena navlažena s tankim slojem prosojne tekočine. V menopavzi upade količina estrogena, zato se zmanjša tudi naravna vlažnost v nožnici. Takrat se tudi tanjša vaginalna stena in ob enem postane manj elastična. Suhost nožnice je druga najpogostejša težava vseh spolno aktivnih žensk. Mnoge se prvič srečajo s težavo, ko začutijo neugodje ali bolečino med spolnim odnosom. Težave lahko spodkopljajo samozavest, vplivajo na razpoloženje in vsakodnevne aktivnosti ter izzovejo splošen občutek nelagodja.

Vzroki za suhost nožnice

Izločanje naravne sluzi v nožnici se najpogosteje zmanjša zaradi hormonskih sprememb, denimo v drugi polovici menstrualnega ciklusa ali pa v obdobju menopavze. Poleg teh obstaja še vrsta drugih dejavnikov, ki lahko izzovejo težave, kot na primer: uživanje hormonske kontracepcije ali določenih zdravil, uporaba mila, tamponov, stres, utrujenost, nosečnost in porod, pa tudi spolni odnos, ko nožnica ni dovolj navlažena z naravno sluzjo ali z ustreznim izdelkom, kot je izdelek Multi-Gyn LiquiGel.