

Multi-Gyn Vaginal Douche

Lastnosti

- Je uporabnicam prijazen in ergonomsko oblikovan izdelek. Uporabi se lahko v poljubnem položaju.
- Idealen je za intenzivno vaginalno higieno, za preprečevanje vaginalnih infekcij in težav.
- Omogoča optimalno izpiranje, saj nastavek brizga bočno in naprej.
- Posebna membrana preprečuje vsrkavanje tekočine in hkrati preprečuje nastajanje pritiska.
- Gladek in gibek cevkast nastavek v kombinaciji z nastavljivim kotom stiskalne platenke zagotavlja popolno udobje pri uporabi.
- Izdelek je idealen v kombinaciji z Multi-Gyn tabletami, vendar je primeren tudi v kombinaciji z drugimi tekočinami za izpiranje nožnice.

Sestava, oblika:




Multi-Gyn Vaginal Douche je registriran v Evropi. Odlikuje ga ergonomska oblika. Zaradi edinstvene oblike in funkcionalnosti, je to edina vaginalna prha s statusom medicinskega pripomočka razreda 1.

BioClin Multi-Gyn Vaginal Douche je sestavljen iz praktične stiskalne platenke z gibljivim vratom. Na platenko je pritrjen upogljiv gladko zaokrožen aplikator z vgrajenim silikonskim oddušnikom. Platenka se z lahka stisne z eno roko. Poseben silikonski oddušnik omogoča, da tekočina zgolj izteče iz platenke, ne more pa nazaj vanjo. V nožnici se ne ustvari pritisk, zaradi česar je izdelek popolnoma varen.

Uporaba:

- Za splošno vaginalno nego.
- Za intenzivno nego v primeru povečanega izcedka, neprijetnega vonja ali obarvanosti izcedka, srbenja, draženja in pekočega občutka.
- Za preprečevanje vaginalnih infekcij in za pomoč pri odpravljanju glivičnih in bakterijskih infekcij.

Za zdravo nožnico je pomembna dobra in ustrezna vaginalna higiena, še zlasti v obdobju spolne aktivnosti, med menstruacijo in ob pojavu vaginalnih težav in/ali infekcij.

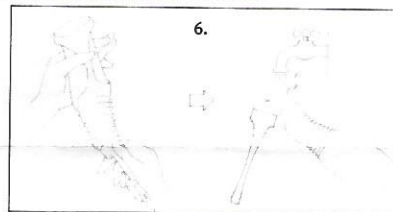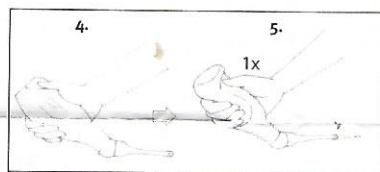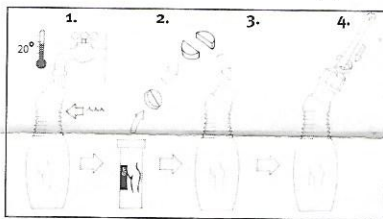

Navodila za uporabo

Vaginalna prha se lahko uporablja v različnih položajih: sede na stranišični školjki, stoje pri tuširanju ali leže v kopalni kadi. Pomembno je, da lahko tekočina po izpiranju neovirano odteče.

1. Poiščite udoben položaj za izpiranje. Do vrha rebrastega dela platenke natočite mlačno vodo.
2. Prelomite Multi-Gyn tableto in jo vstavite v platenko.

3. Na platenko privijte aplikator in počakajte, da se tableta raztopi in preneha peniti.

4. Aplikator nežno vstavite v nožnico in se udobno namesite. Poskrbite, da bo lahko tekočina pri izpiranju neovirano odtekala.

5. Platenko z enkratnim stiskom nežno in do konca iztisnite, da tako izperete nožnico.

Platenke ni potrebno docela izprazniti.

6. Aplikator in platenko temeljito sperite s toplo vodo.

Opozorilo:

Platenke Multi-Gyn Vaginal Douche nikoli ne prekuhavajte in ne dajajte v vrelo vodo, ker se bo povsem deformirala. Če želite razkužiti platenko, jo izperite z razredčenim klorom. Ko se rebrasti del platenke umaže, je priporočljivo, da ga očistite s staro zobno krtačko.



Proizvajalec:

BioClin B.V. Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, Nizozemska



Multi-Gyn Tablets

Značilnosti proizvoda

- Končni odmerki: 1 tableta zadostuje za 1 odmerek Multi-Gyn Vaginal Douche tekočine za izpiranje.
- Vsebuje naravne sestavine, je brez konzervansov, ne vsebuje parfumov.
- Spodbuja rast laktobacilov in poskrbi za optimalno naravno vaginalno okolje.
- Majhna embalaža – tulec s tabletami – zagotavlja enostavnost in diskretnost.
- Je varen in brez negativnih stranskih učinkov.

Šumeče tablete v kombinaciji z Multi-Gyn Vaginal Douche zagotavljajo optimalno intimno nego in s tem preprečujejo vaginalne infekcije in težave, kot so: srbenje, draženje, pekoč občutek in prekomeren izcedek in/ali neprijeten vonj.

Varno izpiranje z naravnimi sestavinami

Koncentrirane šumeče tablete so izdelane iz naravnih sestavin in ne vsebujejo konzervansov. Medtem ko druge koncentrirane tekočine za izpiranje navadno vsebujejo konzervanse, ki škodujejo koristnim vaginalnim laktobacilom in naravnemu vaginalnemu okolju, Multi-Gyn tablete omogočajo pripravo popolne tekočine za izpiranje za varno in učinkovito izpiranje nožnice. Multi-Gyn tablete vsebujejo sestavine, ki spodbujajo rast laktobacilov, ter izvleček iz aloe, ki poskrbi za optimalno stanje tkiva. Multi-Gyn tablete je najbolje uporabljati v kombinaciji z izdelkom Multi-Gyn Vaginal Douche (medicinski pripomoček razreda 1). Multi-Gyn tablete zagotavljajo optimalno intimno nego in preprečujejo ter pomagajo pri odpravljanju vaginalnih infekcij (glivične in bakterijske okužbe).

Indikacije

- Za splošno nego nožnice.
- Za odpravljanje povečanega izcedka, neprijetnega vonja ali obarvanega izcedka, proti srbenju, draženju in pekočemu občutku.
- Za preprečevanje vaginalnih infekcij in kot pomoč pri odpravljanju glivičnih in bakterijskih okužb.

Sestavine

Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Aloe Barbadosis (Aloe Vera) Powder, Lactose, Ascorbic Acid.

Doziranje

Za notranjo uporabo. Uporablja se za izpiranje s pomočjo izdelka Multi-Gyn Vaginal Douche. Platenko napolnite z mlačno vodo in v njej raztopite eno Multi-Gyn tableto. Na platenko privijte aplikator in ga vstavite v nožnico. Nežno in do konca stiskajte platenko, tako boste izprali nožnico.

V primeru, da težave ne ponehajo, se obvezno posvetujte z zdravnikom.

Lastnosti Multi-Gyn tablet

- Pomagajo preprečevati neprijeten vonj in odpravijo povečan izcedek.
- Pomagajo pri preprečevanju vaginalnih težav in odpravljanju vaginalnih infekcij (glivičnih in bakterijskih okužb).
- Spodbudijo rast laktobacilov in poskrbi za optimalno naravno vaginalno okolje.

Stranski učinki

Multi-Gyn tablete ne povzročajo negativnih stranskih učinkov. Ne vsebujejo hormonov, konzervansov, parfumov ali strupenih snovi.

Nosečnost in dojenje

Tekočina za izpiranje, pripravljena iz Multi-Gyn tablet, se lahko brez zadržkov uporablja tudi v nosečnosti in v obdobju dojenja.



Proizvajalec:

BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ, Delft, Nizozemska

