

Baby CHECK STRIP

mini

HITRI TEST ZA UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI ZA DOMAČO UPORABO

UVOD

Ko ženska zanosi, začne njeno telo tvoriti hormon, ki se imenuje hCG (humani horionski gonadotropin). Tvorba tega hormona se začne v trenutku spočetja ter se nadaljuje in povečuje v prvem trimesečju nosečnosti.

Prisotnost hormona hCG v urinu omogoča zgodnje ugotavljanje nosečnosti. Test za ugotavljanje nosečnosti Baby Check STRIP (v nadaljevanju: testni trak Baby Check) je testni trak z reaktivnim delom, ki vsebuje edinstveno kombinacijo poliklonskih in monoklonskih protiteles in proteinsko osnovo, ki vsebuje Na-azid (NaN_3 , $< 0,1\%$).

Ko testni trak pomočimo v urin, ta potuje po reaktivnem delu in pojavi se rožnata kontrolna črta, ki nakazuje pravilno izvedbo testa. Če je v urinu več kot 10 mIU/ml hormona hCG, se pojavi druga, testna črta, ki pomeni pozitiven rezultat.

Test je tako občutljiv, da lahko zazna nosečnost že prvi dan izostanka menstruacije.

VSEBINA PAKIRANJA

Vsako pakiranje vsebuje navodila za uporabo in dva testna trakova Baby Check, posamezno pakirana v hermetično zaprto zaščitno aluminijasto folijo skupaj z vrečko sušilnega sredstva. Vrečka s sušilnim sredstvom ni namenjena uporabi.


Do izvedbe testa ne odpirajte zaščitne folije.

OPOZORILA

1. Test je namenjen izključno za diagnostično uporabo "in vitro". Samo za zunanjo uporabo. Testa in vrečke s sušilnim sredstvom ne smete zaužiti.
2. Pred izvedbo testa pazorno preberite navodila za uporabo. Test je zanesljiv le, če je izveden natančno v skladu z navodili.
3. Če izvajate test na prvi dan izostanka menstruacije, je zelo pomembno, da uporabite prvi jutranji urin, ker ta vsebuje najvišjo koncentracijo hormona hCG. Če vam menstruacija izostaja že več kot teden dni, uporaba prvega jutranjega urina ni več tako pomembna, saj je koncentracija hormona hCG že višja.
4. Test shranjujte pri temperaturi od $+4\text{ }^\circ\text{C}$ do $+30\text{ }^\circ\text{C}$. Ne zamrzujte ga. Če test hranite pri temperaturi $+4\text{ }^\circ\text{C}$, naj bo vsaj 5 minut pred izvedbo na sobni temperaturi.
5. Testa ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti, ki je natisnjen na zaščitni foliji in zunanji embalaži. Testa ne uporabljajte, če je zaščitna folija poškodovana.
6. Testni trak Baby Check je namenjen samo za enkratno uporabo.
7. Shranjujte nedosegljivo otrokom.
8. Po uporabi lahko vse komponente testa odvržete med gospodinjske odpadke.

POSTOPEK TESTIRANJA

1. Urin zberite v čisto in suho posodo brez dodatkov (ni priložena). Nivo urina v posodi naj bo vsaj $\frac{1}{2}$ cm od dna.
2. Zaščitno folijo odrgajte po zarezi in izvlcite testni trak. Zavrzite vrečko s sušilnim sredstvom.
OPOZORILO: Testni trak držite na modrem delu.
3. Testni trak za 5 do 10 sekund pomočite navpično v posodo z urinom, kot kaže slika.
OPOZORILO: Urin ne sme segati nad zgornji rob rdečega kvadratka.
4. Rezultat odčitajte po 5 minutah. Po preteku 10 minut rezultata ne čitajte več. V primeru zgodnje nosečnosti počakajte na odčitavanje do 10 minut.

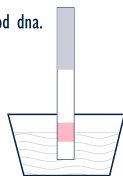

REZULTAT TESTIRANJA

Rožnata črta, ki se pojavi na sredini testnega traku (tik pod modrim delom testa), je kontrolna črta, ki kaže, da je bil test pravilno izveden. Prisotnost ali odsotnost druge rožnate črte (testna črta) pod prvo nakazuje rezultat testa. Razlike v barvi ali intenzivnosti črt niso pomembne: prisotnost druge črte pomeni pozitiven rezultat.

1. NEGATIVEN rezultat: 1 črta (kontrolna): ni nosečnosti

Če druga rožnata črta na testnem traku ni prisotna, niste noseči.

Če v 5 dneh ne dobite menstruacije, test ponovite. Če bo rezultat še vedno negativen, se posvetujte s svojim zdravnikom.



2. POZITIVEN rezultat: 2 črti (kontrolna + testna): nosečnost


Prisotnost druge rožnate črte na testnem traku (pod prvo) nakazuje nosečnost.

Posvetujte se s svojim zdravnikom.



3. NEVELJAVEN rezultat: ni kontrolne črte

Če se na testnem traku kontrolna črta ne pojavi (tudi če je testna črta prisotna), rezultata ni mogoče interpretirati in je neveljaven. Test morda ni bil izveden v skladu z navodili ali pa je bil poškodovan. Ponovite test z drugim testnim trakom ali se posvetujte s svojim zdravnikom.

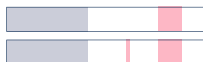

POGOSTO ZASTAVljena VPRAŠANJA

Kako deluje testni trak za ugotavljanje nosečnosti Baby Check?

Ko je ženska noseča, začne njeno telo tvoriti hormon, ki se imenuje hCG (humani horionski gonadotropin). Koncentracija hormona v urinu s trajanjem nosečnosti narašča. Testni trak za ugotavljanje nosečnosti Baby Check temelji na zaznavanju prisotnosti tega hormona.

Kdaj lahko uporabim test?

Testni trak za ugotavljanje nosečnosti Baby Check lahko uporabite od prvega dne izostale menstruacije dalje.

Kdaj je najboljši čas za izvedbo testa?

Test lahko opravite ob kateri koli uri, najbolj priporočljiva (predvsem v zgodnji nosečnosti) pa je uporaba prvega jutranjega urina, ker ta vsebuje najvišjo koncentracijo nosečnostnega hormona hCG.

Ali količina zaužitih tekočin vpliva na rezultat?

Prekomerno uživanje tekočin lahko razredči urin, zaradi česar je lahko zaznavanje hormona hCG oteženo. Priporočamo vam, da pijete normalno.

Ali so rezultati lahko lažni?

Rezultati so točni, dokler natančno sledite priloženim navodilom za uporabo. Rezultati so lahko lažni, če testni trak Baby Check pred testiranjem pride v stik z vlago. Testni trak Baby Check je visoko zanesljiv test, ki je uspešno prestal strogo preverjanje kakovosti, vendar je v izjemnih primerih možen lažen rezultat (negativni rezultat pri noseči ženski in pozitiven rezultat pri ženski, ki ni noseča). Če so rezultati nepričakovani ali si nasprotujejo, se posvetujte s svojim zdravnikom, saj lahko določene zdravstvene težave privedejo do napačne diagnoze.

Določena zdravila, ki vsebujejo hCG ali se uporabljajo v kombinaciji s hCG (npr. Pregnyl, Profasi, Pergonal), in redka zdravstvena stanja lahko vodijo do lažno pozitivnih rezultatov. Alkohol, analgetiki, antibiotiki, kontracepcijske tablete, hormonska terapija, ki vključuje klomifen citrat (npr. Clomid, Serophene), ne vplivajo na rezultat testiranja. Testiranje lahko vodi do lažno pozitivnega rezultata, če ste v zadnjih 8 tednih rodili ali imeli spontano ali umetno prekinitev nosečnosti. Test namreč lahko zazna hormon hCG, ki je zaradi nedavne nosečnosti še vedno prisoten v telesu.

Konica testnega traku je bila v stiku z urinom več kot 10 sekund. Ali bo rezultat kljub temu točen?

Da. Podaljšanje za nekaj sekund ne vpliva na rezultate.

Konica testnega traku je bila v stiku z urinom manj kot 5 sekund. Ali bo rezultat kljub temu točen?

Ne, ker je lahko količina vzorca premajhna.

Kako naj preverim pravilnost izvedbe testa?

V območju kontrolne črte se pojavi rožnata črta, ki nakazuje, da je bil test pravilno izveden. Če se črta ne pojavi, ponovite testiranje z novim testnim trakom Baby Check.

Kako naj preverim rezultat testa?

Če ste noseči, se v 5 minutah pojavita dve rožnati črti. Če je koncentracija hormona zelo nizka, se rožnata testna črta obarva zelo počasi. Zato vam priporočamo, da pred preverjanjem rezultata počakate do 10 minut, saj se le tako lahko prepričate, da hormon v urinu ne obstaja in da niste noseči.

NE UPOŠTEVAJTE REZULTATA, ki se pojavi več kot 10 minut po vzpostavitvi stika med konico testnega traku in urinom.

Kaj pomeni, če se črti pojavita, vendar se njuna barva razlikuje od barve na slikah navodil za uporabo?

Kaj pomeni, če je ena črta manj intenzivna kot druga?

Odtенок in intenzivnost črt nista pomembna. Če je rezultat testa pozitiven, se v predelu testne črte pojavi rožnata črta, katere barva ni nujno enaka barvi črte na sliki ali barvi kontrolne črte. Razlog je v tem, da se koncentracija hCG v urinu med nosečnostjo postopoma zvišuje, zaradi česar se intenzivnost barve postopoma povečuje. Pri nizki koncentraciji hormona hCG (na začetku nosečnosti) je intenzivnost testne črte majhna, vendar je njen pojav treba interpretirati kot pozitiven rezultat.

Ali lahko določena zdravila vplivajo na rezultat?

Zdravila za zdravljenje neplodnosti, ki vsebujejo hCG ali hMG (humani menopavzni gonadotropin), lahko vplivajo na rezultat. Opravljanje testa neposredno po vbrizganju tovrstnih zdravil lahko vodi do lažnega pozitivnega rezultata. Druga zdravila za neplodnost, analgetiki in kontracepcijske tablete ne vplivajo na rezultat. Če pa ste ravnokar prenehali jemati kontracepcijske tablete ali če ste pred kratkim jemali zdravila za neplodnost, lahko to povzroči nepravilnosti v menstrualnem ciklu in ste zato test za ugotavljanje nosečnosti morda nevede opravili preuranjeno.

Kako zanesljiv je testni trak Baby Check?

Klinične raziskave in testiranja "in vitro" kažejo, da je stopnja zanesljivosti višja od 99 odstotkov.

Kako dolgo ostane rezultat stabilen?

V primeru negativnega rezultata se po 10 minutah v predelu testne črte lahko pojavi bleda črta. Ta črta NE POMENI pozitivnega rezultata.

Opomba: NE UPOŠTEVAJTE REZULTATA, ki se pojavi več kot 10 minut po vzpostavitvi stika med konico testnega traku in urinom.

Kaj naj storim, če je rezultat negativen?

Če je rezultat negativen, test ni zaznal nosečnostnega hormona hCG, ker niste noseči. Če en teden po opravljenem testu še vedno niste dobili menstruacije, test ponovite z novim testnim trakom Baby Check. Če je rezultat še vedno negativen in menstruacija še vedno izostaja, se posvetujte s svojim zdravnikom. Vzroke za izostanek menstruacije je morda treba poiskati drugje.

Kaj naj storim, če je rezultat pozitiven?

Če je rezultat pozitiven, obiščite svojega zdravnika. Zgodnja potrditev nosečnosti je izrednega pomena za zdravje nosečnice in njenega otroka.

Proizvajalec:

VEDALAB

Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cerisé, BP 181

61006 ALENCON CEDEX (Francija)

Uvoznik:

DR. GORKIČ d.o.o.

Obrtniška ul. 11

1370 LOGATEC (Slovenija)



0483

Zadnja sprememba 6/2016, VL-3033-07
(MD-030098 m3 c, 06/2016)